



Guía de Uso: Deshumidificador Eléctrico

Manual e instrucciones de mantenimiento para audífonos

El deshumidificador eléctrico está diseñado para eliminar la humedad acumulada en sus audífonos, garantizando un rendimiento óptimo y prolongando su vida útil mediante secado controlado a temperatura constante.

PASO A PASO DE USO

1 Conexión del Equipo

Conecte el cable USB Tipo-C al equipo y posteriormente a un adaptador de corriente de 5V (mínimo 1A)

2 Preparación de los Audífonos

- Limpie cuidadosamente los audífonos removiendo cualquier residuo de cerumen o humedad superficial.
- Retire la batería / pila antes de introducirlos.
- Colóquelos dentro de la cámara del equipo y asegúrese de cerrar la tapa correctamente.

3 Funcionamiento y Parámetros

La luz verde encendida indica que el deshumidificador está en operación activa.

Tiempo recomendado de secado: 8 horas

Temperatura de operación: Aproximadamente 50 °C

4 Finalización del Ciclo

Una vez completado el tiempo de secado, desconecte el equipo de la fuente de energía y retire sus audífonos listos para su uso.

⚠ Precauciones y Recomendaciones Importantes

- No exceder 12 horas continuas de uso.
- Nunca introduzca audífonos con la batería puesta.
- No cubrir el equipo durante su funcionamiento para permitir la correcta disipación.
- Limpiar la zona antes del secado si se observan residuos en el compartimento de la batería.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

💡 Consejos de Mantenimiento

Utilice el deshumidificador todas las noches. El secado nocturno constante previene sulfataciones, fallos electrónicos y extiende significativamente la vida útil de sus dispositivos auditivos.

